

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Pet-Check Harn-Tests.

Dieser hochqualitative in-vitro-diagnostische Gesundheitsvorsorgetest ermöglicht es Ihnen einfach, schnell und zuverlässig, die am häufigsten bei Katzen und Hunden auftretenden Gesundheitsbeschwerden nachzuweisen.

Viele Erkrankungen zeigen bereits abnormale Veränderungen im Harn, bevor andere Beschwerden erkennbar sind. Durch die Früherkennung von Erkrankungen kann die Gefahr, einer ernsten medizinischen Intervention vermieden werden. In Folge kann dadurch die Lebensqualität verbessert sowie die Lebenserwartung gesteigert werden.

Harnstest zur Gesundheitsvorsorge

Test zum Nachweis von Blut, Glukose (Zucker) und Protein (Eiweiß) im Harn geeignet für Hunde und Katzen.

Beschreibung

Dieser Pet-Check Test dient zum Nachweis von Blut, Glukose (Zucker) und Protein (Eiweiß) im tierischen Harn. Mit diesem Test werden Harnwegsinfekte, Diabetes und Nierenfunktionsstörungen angezeigt. Werden abnormale Ergebnisse im Urin nachgewiesen, muss deren Ursache bei einem sofortigen Tierarztbesuch abgeklärt werden. Haustiere zeigen meist erst in einem fortgeschrittenen Erkrankungsstadium klinische Symptome und Beschwerden. Eine sofortige Behandlung der Erkrankung reduziert die Gefahr, dass eine ernste medizinische Intervention notwendig wird. Es ist daher empfehlenswert, den Gesundheitszustand Ihres Haustieres regelmäßig zu kontrollieren. Die laufende Gesundheitsvorsorge ist vor allem für Hunde und Katzen im mittleren Alter, besonders aber bei Übergewicht sehr notwendig.

Test-Materialien

Test in einem Folienbeutel ■ Farbkarte ■ Gebrauchsanweisung

Vorsichtsmaßnahmen

- Nicht das auf dem Teststreifen befindliche Reagenzkissen berühren.
- Verwenden Sie keinen Test, dessen aufgedrucktes Ablaufdatum überschritten wurde.
- Der Test ist nur für eine einmalige Verwendung geeignet.
- Vor und nach der Durchführung des Tests die Hände sorgfältig waschen.
- Nicht für farbenblinde Personen geeignet.

Lagerung

Den Test bis zur Verwendung im Folienbeutel an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur aufbewahren.

Proben-Entnahme

Hunde:

Fangen sie mit einem geeignetem Gefäß (Probensammler) den Harnstrahl auf oder halten sie den Test für etwa 10 Sekunden in den Harnstrahl ihres Hundes. Da nur die freiliegende Teststreifenspitze den Harn aufnehmen kann, muss vor der Probenahme die Schutzkappe unbedingt abgenommen werden. Nach erfolgter Probenahme muss die Kappe wieder aufgesteckt werden.

Katzen:

Geben Sie nicht saugfähige Einstreu oder eine saubere nicht saugende Unterlage in die Katzentoilette und verwenden Sie die so erhaltene Harnprobe.

Testverfahren

Für die Untersuchung benötigen Sie ungefähr 2 ml Harn, das entspricht etwa einem kleinen Kaffeelöffel.

Der Urin Ihres Haustieres sollte innerhalb von 1 Stunde nach der Ausscheidung untersucht werden.

Entfernen Sie die Schutzkappe und tauchen Sie die Testspitze für zehn Sekunden in die Harnprobe Ihres Haustieres bzw. halten Sie die Spitze des Testgeräts in den Urinstrahl Ihres Hundes.

Nach erfolgter Probenahme stecken Sie die Schutzkappe wieder auf das Testgerät. Nach 2 Minuten können Sie den Test durch den Abgleich mit der beiliegenden Farbkarte innerhalb von 10 Minuten auswerten. Zu einem späteren Zeitpunkt dürfen keine Ergebnisse mehr abgelesen werden.

Auswertung und Interpretation



Ergebnis "Ohne Befund":

Wenn die Farbe eines Reagenzkissens ein normales Ergebnis anzeigt (linke Farbfelder auf der Farbkarte), ist der Test "Ohne Befund". Wenn etwaige Krankheitssymptome anhalten, konsultieren Sie auch beim Ergebnis "Ohne Befund" einen Tierarzt!

Ergebnis "Suchen Sie einen Tierarzt auf":

Sobald die Farbe eines Reagenzkissens ein abnormales Ergebnis anzeigt (rechte Farbfelder auf der Farbkarte), konsultieren Sie umgehend Ihren Tierarzt!

Gesundheitsvorsorge

Es ist empfehlenswert, die Untersuchung mit dem Pet-Check Test nach spätestens drei Monaten zu wiederholen.

Dieser Pet-Check Test kann Stoffwechselerkrankungen wie z. B. Diabetes und systemische Erkrankungen, welche die Nierenfunktion beeinträchtigen können, frühzeitig erkennen. Auch Hinweise auf andere endokrine Erkrankungen bzw. Störungen der Harnwege können vorzeitig angezeigt werden. Die laufende Gesundheitsvorsorge ist vor allem für Hunde und Katzen mittleren Alters, besonders aber bei Übergewicht sehr wichtig.

Besonderer Hinweis

Der Pet-Check Harnstest stellt keinerlei Ersatz für eine tierärztliche Untersuchung dar, sondern dient lediglich der Früherkennung und Vorsorge. Für Diagnose und Therapie wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt.

Symbolerklärung

	Gebrauchsinformation beachten		Hersteller
	Temperaturbereich 2-30°C		Chargenbezeichnung
	Nicht zur Wiederverwendung		Artikelnummer
	Verwendbar bis		Pharmazentralnummer